



1 鼻腔用滅菌綿棒の綿球から約5～6cm付近を指でつまむと、より採取しやすくなります。

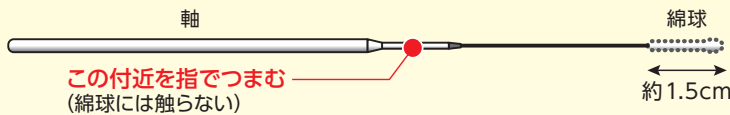

5回転

2 綿棒を鼻孔に挿入します。

- ① 綿棒を綿球全体が隠れる程度(約2cm)挿入します。
- ② 鼻腔内の粘膜を軽くこするようにして、そのままゆっくり綿棒を5回転させます。
- ③ 5秒待ち綿球を十分に湿らせた後、他の部位に触れないよう取り出します。

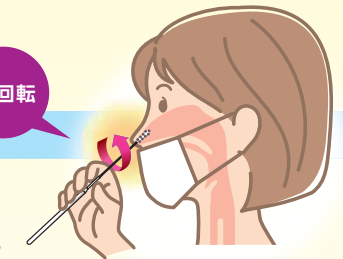

マスクから鼻が出るようにずらしませ



注意点


- 鼻腔検体については、医療従事者またはあらかじめ検査に関する研修を受けた職員の管理下で自己採取することができます。
- 綿球部分に触れないでください。また採取後は手指の消毒、手洗いをおこなってください。
- 採取部位は出血しやすいため、強くこすったり、無理に奥まで挿入しないでください。
- くしゃみをする場合には飛沫に注意してください。
- 異常を感じた際には、採取を中断し、すみやかに医師、医療スタッフにご相談ください。

監修：東邦大学 医学部 微生物・感染症学講座 教授 舘田 一博 先生


操作方法 クイックナビ™ - COVID19 Ag

ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。

試料の調製

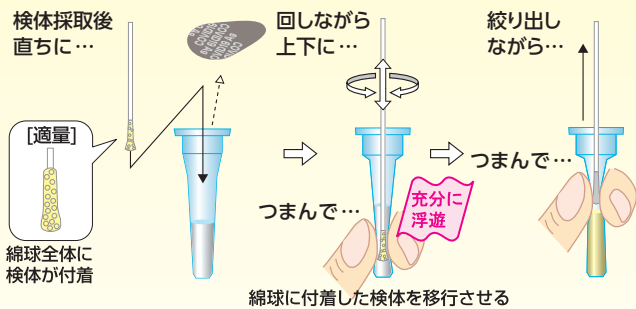


試料ろ過フィルター装着/試料の滴加

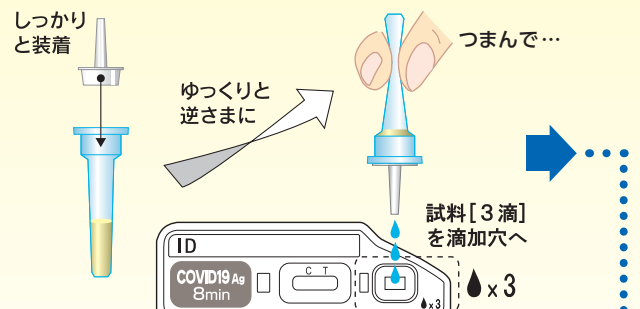



反応時間：～8分間

15～30℃
で静置
そのまま...

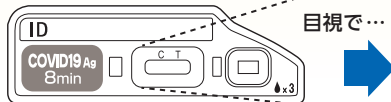

目視で...

検査結果の判定：判定例

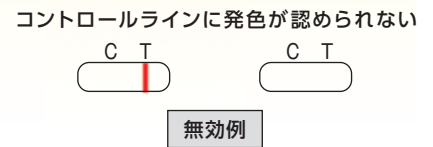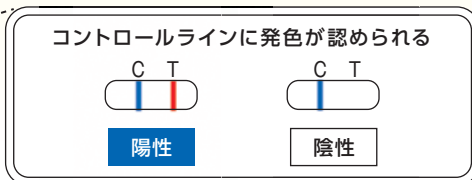

上記は判定例を模式的に表したものであり、実際の見え方とは異なります。

判定は、ラベル表記の時間(例 8min = 8分)経過後、速やかに行います。8分以降の結果は本品の検査結果とはできません。

判定部写真	COVID19 Ag 8min	COVID19 Ag 8min	COVID19 Ag 8min	COVID19 Ag 8min
判定	陽性	陰性	判定保留	
備考	C(コントロールライン): 青色 T(テストライン): 赤色	C(コントロールライン): 青色 T(テストライン): ラインなし	C(コントロールライン): ラインなし T(テストライン): 赤色	C(コントロールライン): 青色 T(テストライン): 灰色



◀◀ 鼻腔ぬぐい液検体の採取および操作方法の動画はこちらのQRコードを読み取りご覧下さい。

【問い合わせ先】

デンカ株式会社 試薬学術担当
〒103-8338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
フリーダイヤル 0120-206-072
受付時間 9:00～17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)